

## INSTRUCTIES EN INFORMATIE - afname vaginale swab

### BELANGRIJK


**LEES DE INSTRUCTIES – Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek.**

**AANVRAAGFORMULIER – Vul het aanvraagformulier volledig in!**

### Inhoud afname-envelop


- ✓ Instructies
- ✓ Aanvraagformulier
- ✓ Buisje met transportmedium
- ✓ Wattenstaaf
- ✓ RigidSafetyBag
- ✓ Twee latexvrije handschoenen
- ✓ Blauwe medische verzendenvelop

### Algemene informatie

- ✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag
- ✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener
- ✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen
- ✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patiëntenarchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens
- ✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar
- ✓  [info@mglab.nl](mailto:info@mglab.nl)
- ✓  058-2150025
- ✓  [www.mglab.nl](http://www.mglab.nl)
- ✓  Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden

### Instructie sample afname

- Trek de bijgeleverde handschoenen aan
- Neem een makkelijke positie aan; bijvoorbeeld zittend, of plaats een been op een verhoging
- Open de verpakking en haal de wattenstaaf eruit zonder het watje aan te raken
- Schroef de dop van het transportbuisje (!) De vloeistof moet in het busje blijven
- Houd de buitenste schaamlippen uit elkaar en breng de wattenstaaf in de vagina
- Breng de wattenstaaf ongeveer 2 tot 3 cm in de vagina en draai de wattenstaaf een aantal maal rond
- Plaats de wattenstaaf in het busje en breek het stokje af zodat deze in het busje past; zie ook de afbeelding op het zakje van het transportmedium
- Draai de dop goed vast
- Noteer uw naam en afnamedatum op het etiket

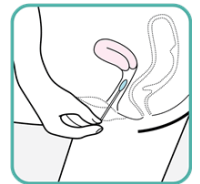

### Instructie inpakken en verzenden

- Plaats het busje in de RigidSafetyBag en sluit deze door de sluitstrip te verwijderen
- Plaats de RigidSafetyBag samen met het aanvraagformulier in de verzendenvelop
- Sluit de verzendenvelop door de plakstrip te verwijderen (!) Laat niet te veel lucht achter in de verzendenvelop
- De verzendenvelop is klaar om te verzenden (!) Bewaar de envelop in de koelkast en post deze, op dezelfde dag, vlak voor de lichter van de brievenbus
- De envelop is gefrankeerd

