



BELANGRIJK

✓ LEES DE INSTRUCTIES

Het opvolgen van de instructies vergroot de nauwkeurigheid van het onderzoek

✓ AANVRAAGFORMULIER

Vul de invulvelden in die van toepassing zijn op het aanvraagformulier en vergeet deze niet mee te sturen met het monster

✓ MONSTERNAME

De vloeistof moet in het buisje blijven en denk erom dat het gaat om het verzamelen van wangslimvlies en niet speeksel

INFORMATIE

✓ Binnen 7 tot 10 werkdagen uitslag

✓ De uitslag wordt gerapporteerd aan uw zorgverlener of aan uw darmklachten.nl account toegevoegd

✓ De medewerkers van het laboratorium zijn niet medisch onderlegd; u kunt niet bij hen terecht voor aanvullend advies over uw uitslagen

✓ Persoonsgegevens worden door MGLab&Advies B.V. opgenomen in een beveiligd digitaal patientenarchief waarop het privacyreglement van toepassing is conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens

✓ De onderzoeken komen niet in aanmerking voor vergoeding bij uw zorgverzekeraar

CONTACT


Postbus 1528 - 8901 BV Leeuwarden
Agora 1 - 8934 CJ Leeuwarden
info@mglab.nl - www.mglab.nl - 058 2120025

INSTRUCTIES en INFORMATIE

LACTOSE-INTOLERANTIE

Instructie afname wangswab

- Open de verpakking aan de bovenkant en haal de wattenstaaf eruit zonder het watje aan te raken
- Schroef de dop van het transportbuisje
(!) De vloeistof moet in het buisje blijven
- Strijk gedurende 30 seconden met een rollende en heen en weer gaande beweging het watje stevig aan de binnenkant van de wang om wangslimvlies te verzamelen
(!) Denk erom dat het gaat om het verzamelen van wangslimvlies en niet speeksel
- Plaats de wattenstaaf in het buisje en breek het stokje af zodat deze in het buisje past; zie ook de afbeelding op het zakje van het transportmedium
- Draai de dop goed vast
- Gooi de handschoenen weg bij het normale afval

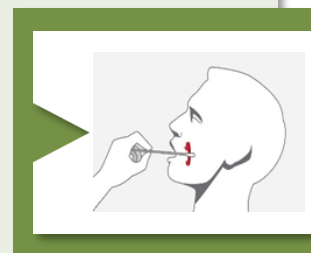

Instructie inpakken en verzenden

- Plaats het buisje in de RigidSafetyBag en sluit deze door de sluitstrip te verwijderen
- Plaats de RigidSafetyBag samen met het **aanvraagformulier** in de verzendenvelop
- Sluit je verzendenvelop door de witte plakstrip te verwijderen
- Post de envelop met inhoud - op de dag van afname - vlak voor de lichte van de brievenbus (**vóór 17.00 uur**)

